

Protokollbogen



Standardisierte manuelle Aufbereitung von transvaginalen
Ultraschallsonden mit Mikrobac® Virucidal Tissues

	Aufbereitung	Aufbereitung	Aufbereitung
Gerätename Sonde	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Seriennummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum Untersuchung	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>
Uhrzeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name der Patientin (optional) beschriften oder aufkleben	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mikrobac Virucidal Tissues			
LOT Nummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Haltbar bis:	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>
Geöffnet haltbar bis:	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>	<input type="text" value=" 20"/>
Standardisierte Verfahren:			
VORBEREITUNG			
Kondom/Gel von der Sonde entfernen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
REINIGUNG			
10 Sek. Schaft/10 Sek. Kopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DESINFEKTION			
10 Sek. Schaft/10 Sek. Kopf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPTIONAL:			
Einkerbung 10 Sek.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINWIRKZEIT: 2 Min.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NACHBEREITUNG			
Aufbereitungsprozess gemäß den Standardarbeitsanweisungen, der im Validierungsprotokoll niedergelegten Parameter erfolgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durchgeführt von (Name):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum/Uhrzeit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unterschrift	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>